

<b>QUIRUMEDICAS LTDA</b>	<b>FICHA TECNICA</b>	<b>FECHA EMISION: 25-03-17</b>
Página 1 de 2	<b>QUIRUGER®</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>

<b>DESCRIPCION</b>	Desinfectante de alto nivel para instrumental y superficies hospitalarias.
<b>COMPOSICION</b>	Cada 100 c.c. de QUIRUGER® contienen: Formaldehído .....0.0128 g Glutaraldehído .....0.0564 g Cetrimida .....0.0513 g
<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	<p><b>DESCRIPCION:</b> Líquido translúcido ligeramente azul (sin activación) o verde (activado), con olor a limón.</p> <p><b>pH:</b> 3.9 - 4.1 (Sin activar) 7.9 – 8.1 (Activado)</p> <p><b>PESO ESPECÍFICO (20°C):</b> 0.99 – 1.01</p> <p><b>SOLUBILIDAD:</b> Soluble en agua, etanol.</p> <p><b>INFLAMABILIDAD:</b> Ninguna</p> <p><b>MICROBIOLOGIA:</b> Mesófilos..... &lt;10 ufc /g Patógenos.....Ausente Mohos y levaduras...Ausente</p>
<b>INDICACIONES DE USO</b>	<p>Desinfectante de alto nivel para instrumental y superficies hospitalarias. Antes de aplicar, incorpore la Solución activadora a QUIRUGER® Solución y agite. Registre la fecha de activación y la fecha máxima de uso (30 días después).</p> <p><b>ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA:</b> Bactericida en 5 minutos Virucida en 5 minutos Fungicida en 15 minutos Esporicida en 30 minutos</p>
<b>PRECAUCIONES DE USO</b>	Uso externo. Manténgase alejado de los niños.
<b>CONTRAINDICACIONES</b>	Desinfectante de uso sobre superficies e instrumental. Durante su uso deben utilizarse elementos de protección personal.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2008DM-0002209-R2
<b>CLASIFICACION DEL RIESGO (RES. 4725 / 05), DISP. MED.</b>	Riesgo II a

<b>QUIRUMEDICAS LTDA</b>	<b>FICHA TECNICA</b>	<b>FECHA EMISION: 25-03-17</b>
Página 2 de 2	<b>QUIRUGER®</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>

<b>BIODEGRADABILIDAD</b>	Si (Relación DBO/DQO = 65%)
<b>VIDA DE ANAQUEL</b>	Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación. Una vez activado el tiempo máximo de estabilidad es de 30 días.
<b>VIDA UTIL DESPUES DE APERTURA</b>	Una vez activado el tiempo máximo de estabilidad es de 30 días.
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar a temperatura no mayor a 30°C en su envase original.
<b>PRESENTACION</b>	Galón x 3650 cc + Frasco de solución activadora Frasco x 1000 cc + Frasco de solución activadora



CLARA S. MEDINA T., Q.F. U.N.  
Directora Técnica /Jefe Aseguramiento de Calidad  
T.P. 04009062609860865